

WARTNER®

Wrattenverwijderaar

Bevriest de wrat in 1 behandeling

Inhoud geschikt voor 12 behandelingen

Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Wartner® gebruikt.

A. Wat zijn wratten?

Wratten zijn goedaardige gezwellen veroorzaakt door het human papilloma virus (HPV). Er zijn verschillende soorten wratten, maar de meest voorkomende zijn de gewone wratten en voetwratten. Deze wratten zijn goedaardige gezwellen, die bestaan uit een kern van bindweefsel met bloedvaten, bekleed met laagjes epitheelweefsel.

Gewone wratten kunt u herkennen aan een ruw, 'bloemkoolachtig' oppervlak. Zij zitten voornamelijk op de handen en voeten.

Voetwratten zijn hetzelfde als gewone wratten alleen zitten zij op de onderkant van de voet. Voetwratten onderbreken het voetpatroon, omdat huidlijnen niet over de oppervlakte van voetwratten lopen. Doorgaans worden voetwratten bedekt door een eeltlaagje en zijn zij pijnlijker en groter dan gewone wratten.



7 tot 10% van de mensen raakt besmet met wratten. Zij komen het meest voor bij kinderen en tieners. Wratten zijn erg besmettelijk en komen vaker voor wanneer het afweersysteem verzwakt is. Wratten kunnen zich verspreiden, van persoon op persoon of van het ene lichaamsdeel naar een ander, door direct contact met de wrat. Meer dan 50% van de wratten verdwijnt vanzelf binnen 2 jaar zonder behandeling. Maar wratten zijn ontsierend en zeker voetwratten kunnen pijnlijk zijn. Daarom behandelen patiënten vaak wratten in plaats van te wachten tot ze vanzelf verdwijnen.

Wratten kunnen op verschillende manieren verwijderd worden. Chirurgische verwijdering, lasertherapie en cryotherapie (bevriezing met vloeibaar stikstof) zijn methodes die door de huisarts gebruikt worden. Wartner is een veilig en effectief alternatief voor de bevroeringsmethode die de huisarts gebruikt.

B. Hoe werkt Wartner®?

Wartner® behandelt voetwratten met een vergelijkbare bevroeringsmethode die gebruikt wordt door de huisarts;

1. Wartner® bevriest de wrat onmiddellijk tot in de kern. Wanneer u het schuimpje met lichte druk op de wrat plaatst, kan de huid wit worden en een pijnlijk prikkelend gevoel ontstaan als gevolg van de bevroering. Wanneer u het schuimpje weghaalt, zal het kleurverlies van de huid verminderen. Het pijnlijk prikkelende gevoel zal snel minder worden en verdwijnt binnen maximaal 24 uur.



2. Nadat het kleurverlies vermindert, kan de huid op de behandelde plek rood uitslaan. Ten gevolge van de bevroering, ontstaat een blaasje onder de voetwrat binnen een paar dagen. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn met het blote oog.



3. Na 10 -14 dagen valt de bevroren huid met de daarop behandelde wrat van het lichaam af. Onder het blaasje heeft zich dan inmiddels een nieuwe huid gevormd.



C. Bijwerkingen:

- Zoals bij alle bevroeringsmethoden kan soms depigmentatie optreden, dat wil zeggen dat de huid wit gekleurd wordt.
- Onzorgvuldig gebruik dat afwijkt van de gebruiksaanwijzing, kan leiden tot te diepe bevroering met beschadiging van de lederhuid met als gevolg littekens en/ of zenuwbeschadiging.
- Te diepe bevroering aan de tenen kan plaatselijk leiden tot het afsterven van weefsel. Houd het schuimpje daarom niet langer dan 40 seconden op de wrat. Bekijk de tabel op de keerzijde om de exacte behandelingsduur te bepalen.

D. Belangrijk: Wanneer u Wartner® niet mag gebruiken: Als u niet 100% zeker bent of de aandoening een voetwrat is, raadpleeg dan voor het gebruik van Wartner® uw huisarts.

Dit product mag alleen door volwassenen toegepast worden. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. Wartner kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht tijdens de zwangerschap gebruikt worden. Verder kan Wartner niet gebruikt worden door diabetici en mensen met een slechte bloedsomloop. Wartner werkt door middel van bevroering. Het is mogelijk dat het bevroren gebied bij diabetici en mensen met een slechte bloedsomloop niet snel of geheel geneest.

Gebruik Wartner niet op tere en gevoelige huidsdelen zoals gezicht, hals, oksels, borsten, billen of genitaliën. Gebruik het niet op een geïrriteerde huid, of een gedeelte dat geïnfecteerd is, rood of er ontstoken uitziet. Wartner mag in geen geval gebruikt worden op donkere moedervlekken, donker gekleurde, behaarde of anderszins vreemd uitzienende aandoeningen die op wratten lijken.

E. Let op:

- Bij twijfel of de aandoening een voetwrat is: raadpleeg uw arts.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik; niet inslikken of inademen, alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- Was de handen direct na gebruik.
- Gebruik Wartner uitsluitend in combinatie met de speciale schuimpjes.
- Gebruik per wrat één schuimpje; gebruik elk schuimpje slechts één keer.
- Bij wratten onder de voet, de tenen langzaam bewegen tijdens de behandeling.
- Bij meerdere wratten aan een voet of een teen slechts één wrat tegelijk behandelen. De overige wratten afzonderlijk behandelen met een tussenpose van 10 dagen.
- Oude en grote wratten zijn moeilijk te verwijderen, zij hebben vaak meer dan één behandeling met Wartner nodig.
- Er is slechts één behandeling per wrat nodig. Alleen bij hardnekkige wratten de behandeling na 14 dagen herhalen. In totaal de wrat niet meer dan drie keer behandelen met Wartner. Indien na drie behandelingen nog geen resultaat is geboekt, dient u naar uw huisarts te gaan.
- De uiterste gebruiksdatum en lotnummer staan op de verpakking en onderop de spuitbus.
- De inhoud van Wartner is brandbaar: gebruik dit product in goed geventileerde ruimtes ten minste 1 meter verwijderd van vuur, vlammen, hitte, direct zonlicht en ontstekingsbronnen als licht. Niet roken tijdens gebruik. Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C. De spuitbus bij voorkeur rechtop en ver van uw lichaam houden en op een stevig oppervlak plaatsen. De houder niet doorboren of verbranden.
- Veilig opbergen, buiten bereik van kinderen houden.

F. Wartner® verpakking bevat:

- Een spuitbus met een mengsel van dimethylether en propaan, dat niet schadelijk is voor het milieu.
- 1 houder voor het schuimpje.
- 12 schuimpjes voor 12 behandelingen met Wartner.
- 1 vijl
- 12 comfort pleisters
- De gebruiksaanwijzing, waarin u alles kunt lezen over wratten, Wartner®, de werking en de behandeling van wratten met Wartner.

G. Gebruiksaanwijzing:

Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Wartner® gebruikt.

Voetwratten hebben, net als oude en grote wratten, vaak 2 tot 3 behandelingen nodig. Indien na de behandeling de voetwrat na twee weken niet geheel verwijderd is, kunt u Wartner veilig nog een keer gebruiken. Wartner mag maximaal 3 keer op dezelfde wrat worden toegepast. Indien na drie behandelingen nog geen resultaat is geboekt, dient u naar uw huisarts te gaan. Gebruik ieder schuimpje slechts één keer en gooi het daarna weg.

H. Nabehandeling:

- Houd de behandelde plek schoon.
- Zwemmen en douchen toegestaan.
- Niet peuteren of krabben aan de behandelde plek.
- Eventuele blaren beschermen met een pleister, blaren niet doorprikken.
- Raadpleeg een arts indien het pijnlijk, prikkelend gevoel niet verdwijnt of een andere complicatie optreedt.

Producent: Omega Technika - Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland
Distributeur: Chefaro Nederland BV - Postbus 6612 - 3002 AP Rotterdam - Consumentenservice: 010 - 22 11 007

www.wartner.nl

CE 0336 spuitbus, houder, schuimpjes
CE comfort pleisters
CE file

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in juli 2006.
30089
30359-35475-0140


Bepaal uw behandelingsduur aan de hand van onderstaande tabel

	Diameter wrat	Behandelingsduur
Wratten op de holte van de voet en de tenen:	kleiner dan 2,5 mm	10 seconden
Wratten op de holte van de voet en de tenen:	van 2,5 mm tot 5,0 mm	15 seconden
Wratten op de holte van de voet en de tenen:	groter dan 5,0 mm	20 seconden
Wratten op de hiel en bal van de voet:	alle diameters	max 40 seconden of minder



Makkelijk te gebruiken in 6 stappen voor voetwratten

- STAP 1** Week de voet met de wrat in warm water gedurende 5 minuten. Daarna goed afdrogen.
- STAP 2** Verwijder het eelt op en rond de voetwrat met de bijgeleverde vijl voordat u Wartner® speciaal voor onder de voet toepast.
- STAP 3** Plaats het schuimpje aan de groene kant tussen duim en wijsvinger en druk het in tot er een kleine opening ontstaat. Schuif de opening van het schuimpje over het stokje van de houder tot het stokje niet meer zichtbaar is.
- STAP 4** Plaats de spuitbus rechtop op een stevige ondergrond en houd deze uit de buurt van uw lichaam of ontstekingsbronnen. Plaats de houder met het schuimpje in de opening aan de bovenzijde van de dop, zodanig dat het schuimpje niet meer zichtbaar is. Druk het ventiel gedurende drie seconden stevig in en houd de bus stevig vast. U hoort een sissend geluid. Haal de houder met het schuimpje uit het ventiel. Het schuimpje is doordrenkt met koude vloeistof en er ontstaat condens. Deze condens is onschuldig.
- STAP 5** Direct nadat u de houder met het schuimpje uit het ventiel heeft gehaald, plaatst u het uiteinde van het schuimpje met een lichte druk op de wrat. Zorg voor continue contact met de behandelde huid. De exacte behandelingsduur afstemmen op bovenstaande tabel waarbij een maximum geldt van 40 seconden. Er zal een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan als gevolg van de bevroering. Wacht na het behandelen van de wrat 2 minuten voordat u met een tissue het schuimpje van de houder verwijdert. Het schuimpje na 1 keer weggoien. Hergebruik het schuimpje niet en raak het uiteinde van het schuimpje niet met blote handen aan om er zeker van te zijn dat u de huid niet infecteert met het wratvirus.
- STAP 6** Na de behandeling met Wartner speciaal voor onder de voet kunnen de bijgeleverde comfort pleisters worden gebruikt om de gevoelige huid te beschermen. Haal de pleister voorzichtig van de folie en breng de kleefzijde aan op de huid met het gat direct op de behandelde plek.

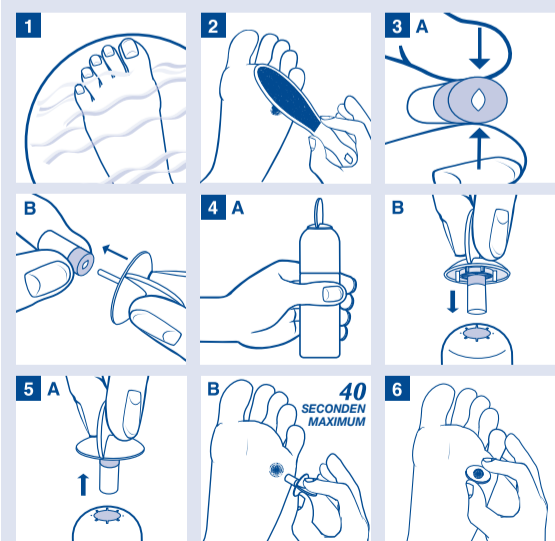

Drukproef: 1e proef
Datum: 16-08-06
FIELD BOXMORE
VAN O.S.
Form.plano: 230x310
Form.gev.: 115x35
Kleur: pms 662
Corps: 6,8 pt