

# WARTNER®

Wrattenverwijderaar

Bevriest de wrat in 1 behandeling

Inhoud geschikt voor 12 behandelingen

Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Wartner® gebruikt.

## A. Wat zijn wratten?

Wratten zijn goedaardige gezwellen veroorzaakt door het human papilloma virus (HPV). Er zijn verschillende soorten wratten, maar de meest voorkomende zijn de gewone wratten en voetwratten. Deze wratten zijn goedaardige gezwellen, die bestaan uit een kern van bindweefsel met bloedvaten, bekleed met laagjes epitheelweefsel.

Gewone wratten kunt u herkennen aan een ruw, 'bloemkoolachtig' oppervlak. Zij zitten voornamelijk op de handen en voeten.

Voetwratten zijn hetzelfde als gewone wratten alleen zitten zij op de onderkant van de voet. Voetwratten onderbreken het voetpatroon, omdat huidlijnen niet over de oppervlakte van voetwratten lopen. Doorgaans worden voetwratten bedekt door een eellaagje en zijn zij pijnlijker en groter dan gewone wratten.



7 tot 10% van de mensen raakt besmet met wratten. Zij komen het meest voor bij kinderen en tieners. Wratten zijn erg besmettelijk en komen vaker voor wanneer het afweersysteem verzwakt is. Wratten kunnen zich verspreiden, van persoon op persoon of van het ene lichaamsdeel naar een ander, door direct contact met de wrat. Meer dan 50% van de wratten verdwijnt vanzelf binnen 2 jaar zonder behandeling. Maar wratten zijn ontsierend en zeker voetwratten kunnen pijnlijk zijn. Daarom behandelen patiënten vaak wratten in plaats van te wachten tot ze vanzelf verdwijnen.

Wratten kunnen op verschillende manieren verwijderd worden. Chirurgische verwijdering, lasertherapie en cryotherapie (bevriezing met vloeibaar stikstof) zijn methodes die door de huisarts gebruikt worden. Wartner is een veilig en effectief alternatief voor de bevroeringsmethode die de huisarts gebruikt.

## B. Hoe werkt Wartner®?

Wartner® behandelt wratten met een vergelijkbare bevroeringsmethode die gebruikt wordt door de huisarts;

1. Wartner® bevroert de wrat onmiddellijk tot in de kern. Wanneer u het schuimpje met lichte druk op de wrat plaatst, kan de huid wit worden en een pijnlijk prikkelend gevoel ontstaan als gevolg van de bevroering. Wanneer u het schuimpje weghaalt, zal het kleurverlies van de huid verminderen. Het pijnlijk prikkelende gevoel zal snel minder worden en verdwijnt binnen een paar uur.



2. Nadat het kleurverlies vermindert, kan de huid op de behandelde plek rood uitslaan. Ten gevolge van de bevroering, ontstaat een blaasje onder de wrat binnen een paar dagen. Dit hoeft niet zichtbaar te zijn met het blote oog.



3. Na 10-14 dagen valt de bevroren huid met de daarop behandelde wrat van het lichaam af. Onder het blaasje heeft zich dan inmiddels een nieuwe huid gevormd.



## C. Bijwerkingen:

- Zoals bij alle bevroeringsmethoden kan soms depigmentatie optreden, dat wil zeggen dat de huid wit gekleurd wordt.
- Onzorgvuldig gebruik dat afwijkt van de gebruiksaanwijzing, kan leiden tot te diepe bevroering met beschadiging van de lederhuid met als gevolg littekens en/ of zenuwbeschadiging.
- Te diepe bevroering aan vingers en/of tenen kan plaatselijk leiden tot het afsterven van weefsel. Houd het schuimpje daarom niet langer dan 20 seconden op de wrat. Bekijk de tabel op de keerzijde om de exacte behandelingsduur te bepalen.

## D. Belangrijk: Wanneer u Wartner® niet mag gebruiken:

Als u niet 100% zeker bent of de aandoening een wrat is, raadpleeg dan voor het gebruik van Wartner® uw huisarts.

Dit product mag alleen door volwassenen toegepast worden. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. Wartner kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht tijdens de zwangerschap gebruikt worden. Verder kan Wartner niet gebruikt worden door diabetici en mensen met een slechte bloedsomloop. Wartner werkt door middel van bevroering. Het is mogelijk dat het bevroren gebied bij diabetici en mensen met een slechte bloedsomloop niet snel of geheel geneest.

Gebruik Wartner niet op tere en gevoelige huidsdelen zoals gezicht, hals, oksels, borsten, billen of genitaliën. Gebruik het niet op een geïrriteerde huid, of een gedeelte dat geïnfecteerd is, rood of er ontstoken uitziet. Wartner mag in geen geval gebruikt worden op donkere moedervlekken, donker gekleurde, behaarde of anderszins vreemd uitzienende aandoeningen die op wratten lijken.

## E. Let op:

- Bij twijfel of de aandoening een wrat is: raadpleeg uw arts.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik; niet inslikken of inademen, alleen gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
- Was de handen (behalve de behandelde huid) direct na gebruik.
- Gebruik Wartner uitsluitend in combinatie met de speciale schuimpjes.
- Gebruik per wrat één schuimpje; gebruik elk schuimpje slechts één keer.
- Bij wratten op de bovenkant van de hand of voet, de vingers of tenen langzaam bewegen tijdens de behandeling.
- Bij meerdere wratten aan een vinger of een teen slechts één wrat tegelijk behandelen. De overige wratten afzonderlijk behandelen met een tussenpose van 10 dagen.
- Er is slechts één behandeling per wrat nodig. Alleen bij hardnekkige wratten de behandeling na 14 dagen herhalen. In totaal de wrat niet meer dan drie keer behandelen met Wartner. Indien na drie behandelingen nog geen resultaat is geboekt, dient u naar uw huisarts te gaan.
- Oude en grote wratten zijn moeilijk te verwijderen, zij hebben vaak meer dan één behandeling met Wartner nodig.
- De uiterste gebruiksdatum en lotnummer staan op de verpakking en onderop de spuitbus.
- De inhoud van Wartner is brandbaar: gebruik dit product in goed geventileerde ruimtes ten minste 1 meter verwijderd van vuur, vlammen, hitte, direct zonlicht en ontstekingsbronnen als licht. Niet roken tijdens gebruik. Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C. De spuitbus bij voorkeur rechtop en ver van uw lichaam houden en op een stevig oppervlak plaatsen. De houder niet doorboren of verbranden.
- Veilig opbergen, buiten bereik van kinderen houden.

## F. Wartner® verpakking bevat:

- Een spuitbus met een mengsel van dimethylether en propaan, dat niet schadelijk is voor het milieu.
- 1 houder voor het schuimpje.
- 12 schuimpjes voor 12 behandelingen met Wartner.
- De gebruiksaanwijzing, waarin u alles kunt lezen over wratten, Wartner®, de werking en de behandeling van wratten met Wartner.

## G. Gebruiksaanwijzing:

Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Wartner® gebruikt.

Er is slechts één behandeling per wrat nodig. 10 tot 14 dagen na de behandeling zijn wratten meestal weg. Oude en grote wratten hebben vaak meer dan één behandeling met Wartner nodig. Indien na de behandeling de wrat na twee weken niet geheel verwijderd is, kunt u Wartner veilig nog een keer gebruiken. Gebruik ieder schuimpje slechts één keer en gooi het daarna weg. Indien na drie behandelingen nog geen resultaat is geboekt, dient u naar uw huisarts te gaan.

## H. Nabehandeling:

- Houd de behandelde plek schoon.
- Zwemmen en douchen toegestaan.
- Niet peuten of krabben aan de behandelde plek.
- Eventuele blaren beschermen met een pleister, blaren niet doorprikken.
- Raadpleeg een arts indien het pijnlijk, prikkelend gevoel niet verdwijnt of een andere complicatie optreedt.


Bepaal uw behandelingsduur aan de hand van onderstaande tabel

Diameter wrat	Behandelingsduur
kleiner dan 2,5 mm	10 seconden
van 2,5 mm tot 5,0 mm	15 seconden
groter dan 5,0 mm	max. 20 seconden

## Makkelijk te gebruiken in 3 stappen


### STAP 1

Plaats het schuimpje aan de blauwe kant tussen duim en wijsvinger en druk het in tot er een kleine opening ontstaat. Schuif de opening van het schuimpje over het stokje van de houder tot het stokje niet meer zichtbaar is.

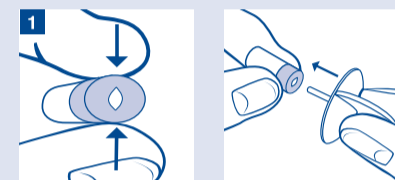


### STAP 2

Plaats de spuitbus rechtop op een stevige ondergrond en houd deze uit de buurt van uw lichaam of ontstekingsbronnen. Plaats de houder met het schuimpje in de opening aan de bovenzijde van de dop, zodanig dat het schuimpje niet meer zichtbaar is. Druk het ventiel gedurende drie seconden stevig in en houd de bus aan de onderzijde stevig vast. U hoort een sissend geluid. Haal de houder met het schuimpje uit het ventiel. Het schuimpje is doordrenkt met koude vloeistof en er ontstaat condens. Deze condens is onschuldig.

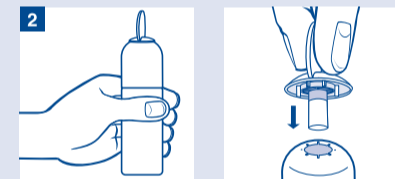

### STAP 3

Direct nadat u de houder met het schuimpje uit het ventiel heeft gehaald, plaatst u het uiteinde van het schuimpje met een lichte druk op de wrat. Zorg voor continue contact met de behandelde huid. De exacte behandelingsduur afstemmen op bovenstaande tabel waarbij een maximum geldt van 20 seconden. Er zal een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan als gevolg van de bevroering. Wacht na het behandelen van de wrat 2 minuten voordat u met een tissue het schuimpje van de houder verwijdert. Het schuimpje na 1 keer weggooien. Hergebruik het schuimpje niet en raak het uiteinde van het schuimpje niet met blote handen aan om er zeker van te zijn dat u de huid niet infecteert met het wratvirus.

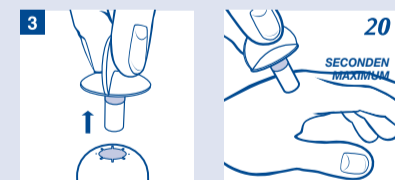

Producent: Omega Teknika - Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland  
Distributeur: Chefaro Nederland BV - Postbus 6612 - 3002 AP Rotterdam - Consumentenservice: 010 - 22 11 007

www.wartner.nl

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in juli 2006.  
30087  
59-35475-0100

CE 0336

Drukproef: 1<sup>o</sup> proef  
Datum: 16-08-06  
FIELD BOXMORE  
VAN O.S.  
Form.plano: 230x310  
Form.gew.: 115x35  
Kleur: pms 662  
Corps: 6,8 pt.